

SEEDS

キャロット3

車載用座位保持装置

CARROT 3

世界最高水準の

障害児用

チャイルドシート



CUSTOMIZE

障害や成長に合わせて 細かくカスタマイズ。

成長

快適

キャロット3は障害や成長に合わせて
長く使えるチャイルドシートです。
本体を買い換えることなく、
調整機能とオプションの買い足しで
組み替えることができます。

1～2才

7才

13才

成人



まずは身体のサイズに合わせて
本体セットと体幹パッドを組み合
わせて使用。



成長に対応し、脚が乗る部分に
「前座」と「座延長パッド」を追加。
腰の部分に「背延長パッド」を追加。



成長に応じて上体を支える「ショル
ダーウィング」を追加。不要になっ
た体幹パッドを外します。



XLの用意があります。特長は、
安全性は保った上で座面の高さ
を限界まで低くしていること。成
長したお子様を抱え上げる際の
負担を減らしています。

こだわりの素材と機能

安全性を保ちながら、使い勝手のよさにもこだわっています。


リクライニングが スムーズ

車のシートを倒すと、
キャロット3の背も
連動して倒れます。



5点式ベルトが ワンタッチで 調整可能

姿勢保持のための5点
式ベルトの張り調節が
ワンタッチでできます。

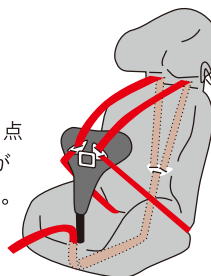


多様なシートに 簡単に取り付け

普通の車だけでなく、
通学バス、航空機など
多様なシートに
取付が可能です。



通気性に優れた 特殊なメッシュ生地を採用

汗で蒸れやすい背もたれと
座面のカバーには、
立体的な網目構造の生地を
採用しています。通気性が良く
湿気がこもりにくいので、
長時間のドライブも快適です。

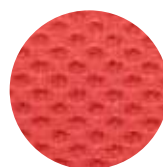

選べる色

本体カラーは赤、青、黒の3タイプ。



CARROT 3

キャロット3は、日本製で唯一
3つの安全テストをクリアしている
障害児用チャイルドシートです。

安全




キャロット3は、日本を含むヨーロッパ(ECE R44/04)と
米国(FMVSS No.213)、米国(FAA)の
3つの安全テストをクリアしています。
日本で3つの安全テストをクリアしている
障害児用のチャイルドシートはキャロット3だけです。

テスト動画視聴



ECE R44/04:取得済み

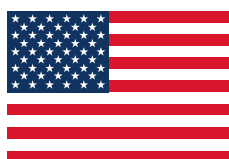

FMVSS No.213:認証済み



FAA:認証済み

※飛行機内でご使用いただけます



GERMANY

ドイツ、ドレスデンでのテスト。
ダミーは32kgで実施。



USA

アメリカ、ミシガン大学でのテスト。
ダミーは23kgで実施。



USA

アメリカでのテスト。
航空機を想定しダミーを逆さまにします。

開発ストーリー

世界37ヶ国で
愛用されています。

「身体に障害のある子どもたちが安心して使えるチャイルドシートを作りたい」という気持ちから始まったキャロットの開発。
1999年、日本で初めてクラッシュテストをクリアし、
安全性の確認された障害児用のチャイルドシートを
世に送り出すことができました。
現在は3代目モデル「キャロット3」を販売しています。
日本だけでなく、ドイツ、アメリカ、オーストラリアなど
世界37ヶ国の子どもたちが愛用中です。



2019年10月1日、キャロット3は
ANA(全日本空輸株式会社)様の
貸出用アシストシートに
正式採用されました。

Mサイズ・Lサイズの
2種類が採用されて
います。事前予約で
無料で利用すること
ができます。



OPTION
豊富なオプション
CARROT 3



ヘッドサポートの奥行き調整
前後各15mmの奥行き調整ができます。



座面の奥行き調整
背もたれの軸を後方に変更することで、座面奥行きを35mm深くすることができます。

調整POINT

座面前方の前座パーツ位置調整ベルトを引くことでロックが外れます。お子様に合った座面の長さを選択して下さい。(最大125mm)



座延長パッド
[50mm/100mm]
座面の隙間を埋めるパッドです。前座やフットレストと組み合わせて使います。
※単独での使用はできません。

前座S [ショート]
膝を曲げた姿勢になります。

前座L [ロング]
投げ出し座りになります。下腿を支えます。

防水パッド
失禁や食べこぼしなどを受け止め、シートの汚れを軽減することができます。


エアーメッシュパッドセット
通気性がアップし、湿気がこもりにくくなります。

フットレスト
[S/M/L]
膝を曲げた姿勢で足底も支えます。
※足台は折りたたみと高さ調整が可能です。

下腿長の目安
S 250～320mm
M 300～420mm
L 350～470mm

抜け出し防止ベスト
脇の隙間が小さくなるので、肩ベルトから腕が抜け出しにくくなります。

調整POINT
背面の両サイドにある黄色のボタンを押してウイング巾を調節します。(左右独立、最大50mm)

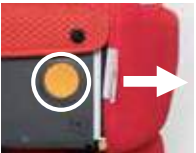

ショルダーウイング
肩を支え姿勢の安定性を向上させることができます。
※座位時の肩までの高さが45cm以上必要です。

調整POINT
背もたれの背面にある高さ調整ベルトを引くことでロックが外れます。お子様に合った背もたれの高さを選択して下さい。(最大125mm)



背延長パッド
[50mm/100mm]
背もたれと座面の隙間を埋めるパッドです。

サポートテーブル
上肢を支え姿勢の安定性を向上させることができます。

三角マット
座を傾斜させる時に使います。

内転防止パッド
脚の内転を防止します。

!
●背延長パッドおよび座面延長パッドは、50mmと100mmを連結(150mm)した状態での使用はできません。
●前座S(ショート)は、座延長パッド100mmと組み合わせて使用することはできません。

その他オプション



3D
体幹パッド



胸パッド
S




ショルダーウイング



骨盤パッド
S M L



ヘッドレスト
S

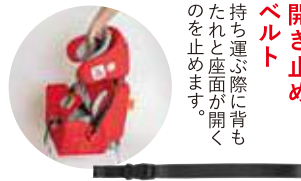


開き止めベルト

規格・寸法


標準仕様

※単位はmm

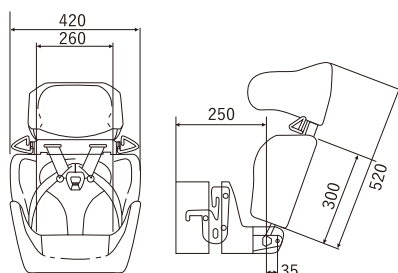

全体巾	420mm
	ショルダーウィング装着時 460~560mm
背もたれ高さ	520~645mm
	ショルダーウィング装着時 670~795mm
座面奥行	250mm(+35mm)

標準仕様+ショルダーウィング装着時

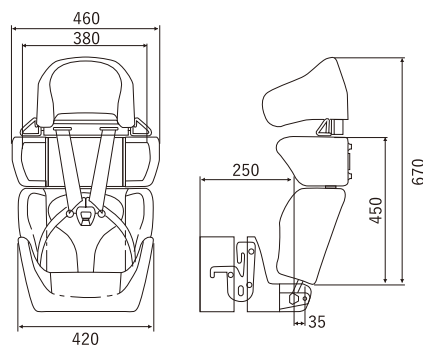

シート巾(内寸)	260mm
製品重量	8.7kg
	ショルダーウィング装着時 10.5kg
許容体重	10~49kg
適用年齢	2~15才程度


※夏季には車内が高温になり金属部分が熱くなることがあります。金属部分がお子さまの体に直接触れないようご注意ください。

※このカタログ写真は、印刷の関係上実際の商品とは多少異なる場合があります。 ※この製品の仕様については、改良のため予告なく変更する場合があります。

関連商品

大人のためのキャロット3-XL

成長してから初めてキャロット3を導入される方におすすめの大人のためのキャロット3-XL。成長した子どもを介護する時に福祉器具に求められる「抱え上げの負担軽減」に考慮した設計。既にキャロット3をお使いの方で、成長により適用範囲を超えた方向けに改造用のXL-Kit もオプションで準備しています。

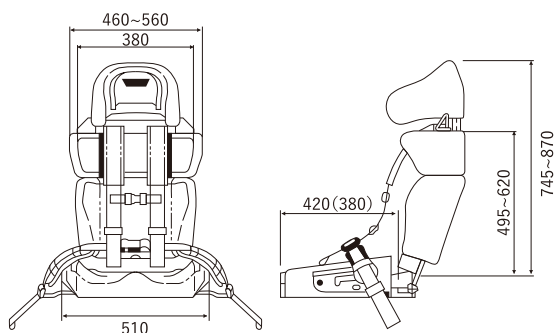

全体幅	510mm~560mm	製品重量	10.5kg
座面奥行き	420mm(380mm)	許容体重	75kg
シート内幅	420mm	適用身長	145~180cm
背もたれ高さ	745~870mm		



4点式ベルトを5点式に変更し安定感をアップすることができます。



+ オプション



XL-Kit



XL用
サポート
テーブル



パッド付
股ベルト



三角マット



背延長パッド
[100mm]



3D
体幹パッド

SEEDS

株式会社シーズ

〒854-0007 長崎県諫早市目代町705-16
TEL 0957-22-6350 FAX 0957-22-6371
✉ seeds.seating@gmail.com(代表)

<http://www.seeds-seating.com>

seeds seating



販売代理店