

車載用座位保持装置

キャロット3 XL キット

組立説明書



※ 組立は、必ずご購入いただいた販売店へご依頼ください。間違った組立て方をすると安全性が損なわれるおそれがあります。

※ 組立後、ご使用になる前に、XL シートの取扱説明書を必ずお読みください。



保管用

あとで使えるように、
お手元に保管してください



SEEDS

キャロット 3 XL キット組立説明書

キャロット 3 XL キットとは




キャロット 3 XL キットは、お子様の体が成長のために大きくなられた時に、キャロット 3 スタンダードを XL サイズに拡張するためのオプションです。

このキットを使用される場合の適正やフィッティングについては、購入前に必ずかかりつけの医師にご相談ください。



本製品はヨーロッパ安全基準 ECE R44/04 に準じた、75kgダミーによるクラッシュテストに合格しています。

組立前に箱の中身を確認してください

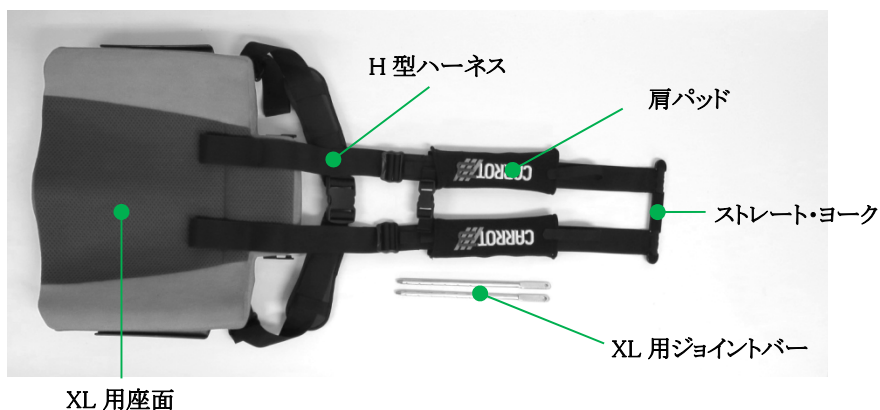

1. キャロット 3 から、5 点式ベルトと座面を外す

1. ヘッドサポート背面の肩パッド高さ調節ベルトを外し、前方に引き抜きます。
(図 A)
2. 背面のヨークから肩ベルトのループを二本とも外し、前方に引き抜きます。
(図 B)
3. 背の背面にある背高さ調節ベルトの D カンを持ち(図 C)、ジョイントバーから背を引き抜きます。(図 D、E)

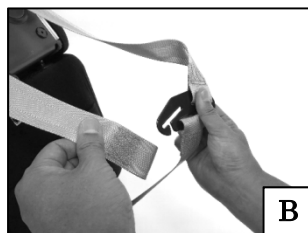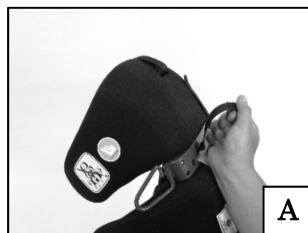

注意:

ジョイントバーを座面に取付けるためのノブボルトと下部固定ベルト(下図)は XL キットの組立時に再利用しますので、キャロット 3 の外した座面から回収してください。






2. XL 用ジョイントバーと下部固定ベルトの取付け

4. キャロット 3 の座面から回収したノブボルトを使って、XL 用のジョイントバーを XL 用座面に取付けます。前方の穴で座面奥行 380mm、後方の穴で 420mm が選択できます。(図 F)


ジョイントバーには前後の向きがあるので、必ず穴のあいた側を前方に向けて取り付けてください。逆に取り付けた場合は、背もたれの高さ調節と固定ができなくなります。(図 G)

5. キャロット 3 の座面から回収した下部固定ベルトのループを、XL 用ジョイントバーに通します。(図 H)

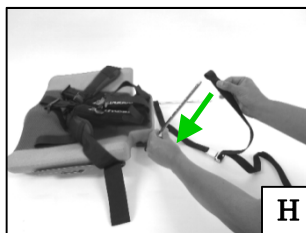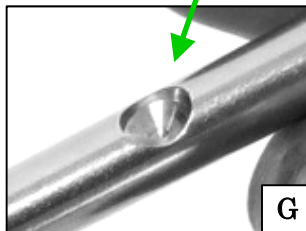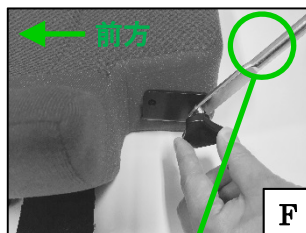

3. XL 用座面にキャロットの背もたれを取り付ける

7. 背高さ調節ベルトの D カンを引きながら(図 I)、XL 用ジョイントバーにキャロット 3 の背もたれを差し込みます。(図 J)

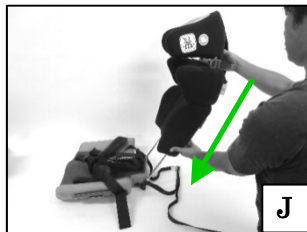


4. H 型ハーネスの取付け

1. XL 用座面に取付けてある H 型ハーネスからストレートヨークを外します。(図 K、L)



2. ハーネス末端のループを三角に折り(図 M)、ヘッドサポート下の肩ベルト用スリットに通します。(図 N、O)
3. 片側を通したら、もう片方も同様に通します。

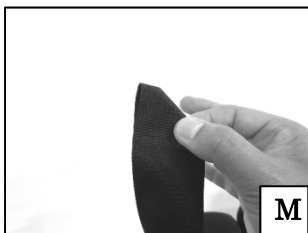

4. 次に H 型ハーネスの肩パッド高さ調節ベルトをスリットに通し、ヘッドサポートの背面に貼り付けます。(図 P)




1. H 型ハーネスのループに、最初に外したストレートヨークを、再度取付けます。


(図 Q)



2. 取付けの際は、H 型ハーネスのループがストレートヨークの爪にきちんとかかり、外れないようになっていることを確認してください。(図 R)

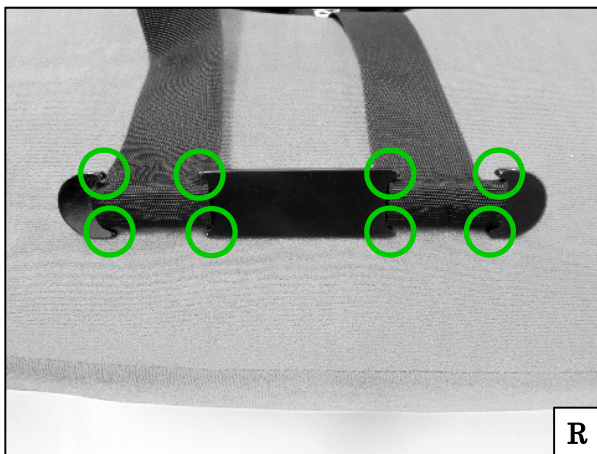


7. 背面のストレートヨークの取り付けが終わったら、H型ハーネスのたるみ無くすために、ハーネス左右の連結部分(正面側)を持ち、前方へ引き出します。(図 S)

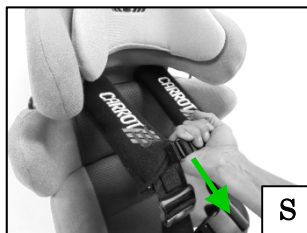

5. 組立が終わったら

1. XL 用ジョイントバーの長さは、キャロット 3 スタANDARDのものよりも 50mm長くなっています。

背もたれを最低に下げても、座面との間に 50mmの隙間が空きますので、オプションの背延長パッド 50mmを使用して隙間を埋めてください。(図 Q)

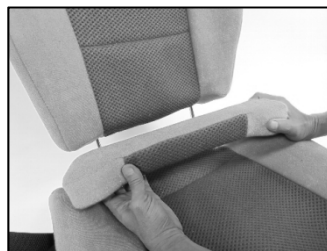

全ての組立が終わったら、この組立説明書を再度読み返し、手順通り間違いなく組み上がっているかどうか確認してください。

また実際の使用の際は、付属の「キャロット 3 XL シート 取扱説明書」を熟読していただき、車両への取付けやお子様へのフィッティングにお役立てください。

