

(クッションチェア用オプション)

# 防水パッド 取扱説明書

## ①防水パッドの前後を確認します。

- ・サイズ及び素材タグが付いている方が背中側となります。



## ②クッションチェアの座面に敷き込みます。

- ・底部の角を合わせるようになじませます。
- ・パッド付シートベルトは防水パッドごと留めて使用しますので、下敷きにならないようベルトホルダーで引き上げておきます。



## ③防水パッドを固定します。

- ・四隅のマジックテープをシートパッドの裏へまわし固定してください。
- ・パッド付シートベルトをご使用になる場合は、防水パッドごと留めてください。



## ～お手入れ方法～

- ・中性洗剤を使用した手洗い・陰干し推奨です。
- ・洗濯器(脱水含む)をご利用の際は、洗濯ネットをご使用ください。マジックテープがほかの衣類を傷つける恐れがあります。



⚠ 火気の近くでご使用しないでください。

⚠ 防止パッド以外の目的でご使用しないでください。

【素 材】(表地:ポリエステル100%, 裏地:ポリウレタン100%, テープ:ナイロン100%)

# SEEDS

株式会社シーズ

〒854-0007 長崎県諫早市目代町705-16

TEL:0957-22-6350 / FAX:0957-22-6371

<http://www.seeds-seating.com>

日本製

180412