

クッションチェア

エアー及びレザー 共通取り扱い説明書



— ヘッドレスト —

頭部をしっかり支えて横倒れを防止します。

— シートパッド —

通気性のよいウレタンとエアメッシュ生地のカバーで、汗をかいてもいつもサラサラ。洗濯機で洗うことができます。

— 三角マット —

本体の下にクサビのように敷き込むことにより、よりリクライニングさせた姿勢や、上半身を起こした姿勢をつくることができます。

— カバー —

高い防水性がありながら、内部の湿気を逃がす透湿性のあるPULゼーを採用しました。防炎機能もありますので、より安心してお使いいただけます。

— ポケット —

左右どちらにも取り付け可能です。タオルなど日常の小物入れにご使用ください。

— ウレタン(内部) —

防炎仕様のものを使用しています。

■ 重力を利用する椅子

クッションチェアは、ベルトやパッド類で体を支えるのではなく、座面と背もたれのリクライニング及び椅子の両サイドが体を支える構造により、姿勢を安定させる椅子です。どう傾けても背もたれと座面の角度は一定に保たれているので、常におしりで体重を受けることになり、寝ているのではなく「座っている姿勢」をとることができます。

■ セカンドチェアとして

食事、遊び、学習などで姿勢を正して座る椅子がファーストチェアとするならば、クッションチェアはゆっくりとくつろぐための「セカンドチェア」といえます。クッションチェアを座位保持装置などのファーストチェアと併用しておつかいいただくことにより、使い分けで生まれる生活リズムや体位の変化などのより良い相乗効果が期待できます。

■ 使用時間について

- ⚠️ いくらリラックスできる姿勢といっても、同じ姿勢を30分以上続けると苦痛になります。長時間連続してのご使用はお避け下さい。自分で姿勢を変えることができない方の場合は特にご注意ください。

■ リクライニングについて

クッションチェアの最も重要な座位保持要素です。本体の座面背もたれは既にリラックスして座位がとれる角度で構成されていますが、三角マットをご利用いただくと、テレビを見たり休息をとるなど、さらに目的に応じた角度に調節ができます。

- ⚠️ 強い緊張や側弯のある方の場合、後方または側方への転倒の恐れがありますので、十分注意してご使用ください。
- ⚠️ 側方への傾きが強い場合、三角マットを横から差し込んで対応できる場合もありますが、十分注意してご使用ください。

■ その他

- ⚠️ カバー類が汚れた場合は中性洗剤を含ませた布を固く絞って汚れを拭き取ってください。洗濯機、乾燥機のご使用はおやめください。
- ⚠️ クッションチェアは主にPULゼー生地のカバーとウレタンで構成されています。廃棄につきましては、最寄の行政担当窓口におたずねください。

■ ベルトホルダーについて



本体カバー袖のゴムコードにパッド付シートベルトの端部のDカンを通して使用します。

※強く引くと切れる恐れがございます。



チェアへの乗り降りの際に、ベルトが座面へ落ち込むことを防ぎ、スムーズにベルトを使用することが出来ます。

■ カバーの違いによる特徴と注意点

(クッションチェア エアー)



- 背中と製品背面には通気性のよいシングルメッシュ生地を、太ももが当たる内側の壁には肌触りがいいダブルメッシュ生地を使用しております。
- ご家庭で使用されている扇風機やサーキュレーターで背面より風を送ることでより通気性がアップします。
- 更に強力に湿気を逃がしたい方には、後からウレタン内部に直接設置することが可能な「ファン」をオプション品にて準備しております。
- ⚠ 液体が染み込んだり、ゴミやホコリが詰まる可能性がございます。

(クッションチェア レザー)



- 内側まで全てPUレザー生地でカバーリングされており、汚れのふき取りやアルコールなどによる消毒が容易にできます。
- ⚠ 採用しているPUレザーは内側の湿気を逃がす透湿性のある素材を使用しておりますが、「エアー」に比べウレタンの内部に熱が籠りやすくなっております。

※ ウレタン(内部)の仕様は共通であり、後から背面にファン(オプション品)が装着できる仕様となっております。

保証書

- 1、保証期間はご購入後1年です。
- 2、保証期間中に「正常な使用状態」において「製造上の欠陥」による故障については、無償修理いたします。ただし、摩耗やカバーの破れ等は除きます。
- 3、次の場合は保証期間中でも有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理改造による故障
 - (ロ) 天災地変などによる故障
 - (ハ) 保証書に販売店の押印のない場合
 - (ニ) 保証書を紛失された場合
 - (ホ) ご購入後、保証書にお客様名の記入がない場合
または不当な変更を加えた場合
- 4、故障の場合は販売店へご連絡ください。
- 5、この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in JAPAN.

■ 発売元

株式会社 シーズ
〒854-0007 長崎県諫早市目代町705-16
TEL 0957-22-6350 FAX 0957-22-6371

ご住所	販売店
TEL	
お名前	印
お買い上げ日	
平成 年 月 日	