

OPTION

豊富なオプション

CARROT 3



ヘッドサポートの奥行き調整
前後各15mmの奥行き調整ができます。

座面の奥行き調整
背もたれの軸を後方に変更することで、座面奥行きを35mm深くすることができます。

調整POINT

背面の両サイドにある黄色のボタンを押してウイング巾を調節します。(左右独立、最大50mm)



抜け出し防止ベスト

脇の隙間が小さくなるので、肩ベルトから腕が抜け出しにくくなります。



ショルダーウイング

肩を支え姿勢の安定性を向上させることができます。
※座位時の肩までの高さが45cm以上必要です。



その他オプション



調整POINT

座面前方の前座パーツ位置調整ベルトを引くことでロックが外れます。お子様に合った座面の長さを選択して下さい。(最大125mm)



防水パッド

失禁や食べこぼしなどを受け止め、シートの汚れを軽減することができます。



エアーメッシュパッドセット

通気性がアップし、湿気がこもりにくくなります。



座延長パッド

[50mm/100mm]
座面の隙間を埋めるパッドです。前座やフットレストと組み合わせて使います。
※単独での使用はできません。




調整POINT

背もたれの背面にある高さ調整ベルトを引くことでロックが外れます。お子様に合った背もたれの高さを選択して下さい。(最大125mm)



背延長パッド

[50mm/100mm]
背もたれと座面の隙間を埋めるパッドです。

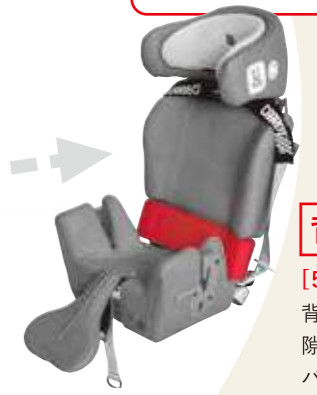


サポートテーブル

上肢を支え姿勢の安定性を向上させることができます。



前座S [ショート]

膝を曲げた姿勢になります。

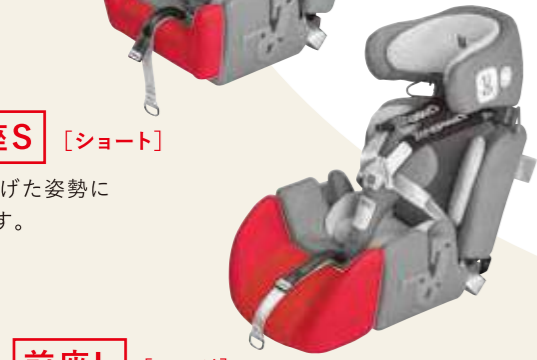


前座L [ロング]

投げ出し座りになります。下腿を支えます。



フットレスト

[S/M/L]
膝を曲げた姿勢で足底も支えます。
※足台は折りたたみと高さ調整が可能です。

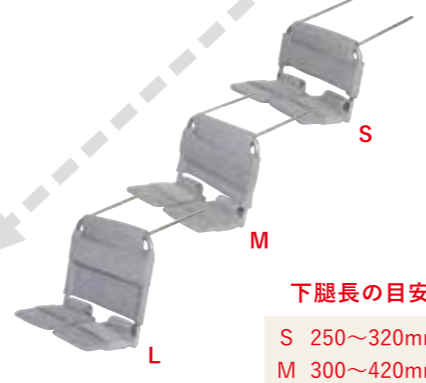

下腿長の目安

- S 250~320mm
- M 300~420mm
- L 350~470mm

三角マット

座を傾斜させる時に使います。



内転防止パッド

脚の内転を防止します。



!

- 背延長パッドおよび座面延長パッドは、50mmと100mmを連結(150mm)した状態での使用はできません。
- 前座S(ショート)は、座延長パッド100mmと組み合わせて使用することはできません。